

ホットル専用ティッシュと水の補給方法

- ・電源コードを、必ずコンセントから抜いて、補給を行ってください。
- ・取扱説明書の「安全上の注意」を読み、適切な平らな場所に設置して、専用ティッシュと水の補給を行ってください。
- ・補給の際、水滴がたれる可能性があります。水滴を拭き取りやすいテーブルの上などで補給を行ってください。



①セットつまみを「OFF」へ回します。取り出しふたを開き、中にある2つの絞りローラーが開いていることを確認します。



②上ふたユニットをOPEN（反時計回り）に回し、上ふたユニットを取り外します。



③上ふたユニットを取り外す時、水滴がたれる可能性がありますのでご注意ください。中のお湯を捨てる場合、注意して捨ててください。



④専用ティッシュを1本用意し、内容器にセットします。必ず、付属の底じき金具を内容器の底へセットしてください。



⑤やかんなどを使い、水を水位計の上限まで注ぎます。



⑥専用ティッシュの内側からティッシュの端をつまみ、上へ引き出します。お湯が熱い場合は割りばしなどをご使用ください。



⑦ティッシュの端を2つの絞りローラーの間に通し、上へ引き出します。



⑧セットつまみを「SET」へ回し、2つの絞りローラーでティッシュを挟みます。上ふたユニットを時計回りにしっかり取り付けます。



ホットルケア HC-100
オープンブライス



ホットル専用ティッシュ HP-100
18×30センチ/カット 65カット/ロール
標準価格 1パック(2ロール入り) 1,460円(税別)
1箱(10ロール入り) 7,300円(税別)

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
予告なくデザインや仕様が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

7-03-2018.06

■製造元

株式会社 **中川製作所**
NAKAGAWA MFG. CO., LTD.
〒335-0005 埼玉県蕨市錦町2-5-21
TEL 048-444-8211 FAX 048-443-6652
www.nakagawa-mfg.co.jp
フリーダイヤル ☎ 0120-933-317

■お問い合わせは下記へ

ホットルケア
Hottle Care



介護・医療
の必需品

いつもあたたか
いつも清潔

NAKAGAWA MFG. CO., LTD.

使い方はカンタン

「ホットルケア」に専用ティッシュをセットして水（※1）を注ぎ、電源を入れるだけ。これで昼でも夜でも快適温度に温められたウェットティッシュの出来上がりです。倒れにくい形にするとともに、万一、転倒した時は、転倒検知スイッチにて通電をストップします。



天然素材のやわらかさ

専用ティッシュは、天然パルプを主原料とした不織布。ソフトで弾力性があり、市販ティッシュの6～8倍も丈夫です。吸水力や保水力に優れており、汚れをキレイに拭き取り、肌ざわりはあくまで優しい理想的な素材です（※2）。

お湯で保温、使い捨てで衛生的

防腐剤やアルコールなどの薬品を一切使用せず、70℃のお湯だけで保温します。だから、デリケートな肌をお持ちの方にも安心してご使用いただけます。あせもやかぶれ予防にも効果的です。専用ティッシュは使い捨てなので大変衛生的です。

便利な業務用プロツール

電源を入れ約30分で湯温が約70℃になります。電源を切った場合、2時間後でも約60℃を保持しますので、持ち運んでの作業にご使用いただけます。ハンドルがついていて持ち運びに便利です（※3）。

専用ティッシュにはミシン目が入っていて、片手でサッと、温かいウェットティッシュを素早く取り出せます。サイズは大きめの18×30センチでボリュームがあり、汚れなどをしっかりキレイに拭き取れます。

介護や医療、保育といった様々な現場で大活躍します。



ホットルケアは3代目

初代ホットルは、介護や医療の現場で永年にわたり、ご愛顧いただきました。2代目は、ホットルベビーとして、開発時にご要望の多かった赤ちゃんのおしり拭きのニーズにお応えしてきました。そして3代目のホットルケアは、初代ホットルを実際にお使いいただいているヘルパーや介護福祉士、看護師など現場の方々から、新機種の強いご要望を多数いただき、開発に至りました。是非、介護や医療の現場でその使い勝手の良さをお試しく下さい。

- ※1 飲料に適した水道水をご使用ください。
- ※2 使用したティッシュはトイレには流せませんのでご注意ください。可燃ゴミとして処理してください。
- ※3 衛生面を考慮し、持ち運んでの作業時以外は常時通電の上、1週間以内に使い切ることをお勧めします。それ以上経過した場合はティッシュと水を新しいものに交換してください。

Voice

初代ホットルを永年に渡り、お使いいただいている皆様の声を集めました。

介護の現場で

介護福祉士やヘルパーの方の声

- ・排泄介助の時に使います。専用ティッシュを取り出して、4つに畳んで用意します。水をしっかり含んでいますので、キレイに拭き取ることができます。
- ・なんといっても、使い捨てなので衛生的です。
- ・温かいので、入居者の方からも大好評です。
- ・入居者の方をキレイにしたいという気持ちに、ホットルはしっかり応えてくれます。
- ・以前はタオルを使っていましたが、消毒して、洗濯して、たたんでウォーマーに入れる作業を1日に2～3回繰り返す必要があり、大変な手間がかかっていました。それに比べ、ホットルは専用ティッシュと水を入れ、コンセントに差し込むだけでカンタンです。
- ・排泄介助には、欠くことのできない必需品です。
- ・新しく来たスタッフから「こんなにいいものがあったの!」という声を聞くことがあります。
- ・排泄介助用とは別に、イベント（誕生会など）時や食事の時のお手ふきや口ふきなどに使用するホットルも別途用意しています。



医療の現場で

看護師や介護福祉士の方の声

- ・寝たきりの患者様の病棟で、排泄介助に使用しています。各病室に1台ずつ、オムツ交換用のワゴン2台に各1台ずつ、看護室に予備の2台、食堂に1台使っています。
- ・準備に手間がかからないのが便利です。ティッシュの取り換えもカンタンです。
- ・温かくて、水分の絞り具合も丁度よく、汚れをキレイに拭き取れ、使い勝手が大変良いです。その良さは、使ってみないと中々わからないかもしれません。今では手放せません。
- ・使い捨てなので、衛生面も安心です。
- ・（検査科で）ゼリーやクリームを使用する検査には必需品です。温かいので不快感はありませんし、しっかり拭き取れ、患者様にも大変好評です。



その他に

在宅介護で

大変な排泄介助に



保育で

赤ちゃんのおしり拭きに



エステサロンなど美容で

化粧落としやオイル・クリームなどの拭き取りに

